


# FFP2 NR D AURORA AIR

Partikelfiltrierende Halbmaske  
Zertifiziert nach EN 149:2001+A1:2009

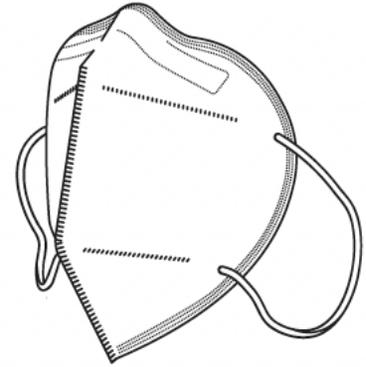

**REF** CMAA00K0200



DE Filtrierende Halbmaske  
EN Filtering face-piece respirators  
FR Demi-masques filtrants  
IT Facciale filtrante monouso  
ES Mascarillas autofiltrantes desechables  
PT Respiradores filtrantes  
NL Filtrerende halfmaskers  
SV Filtrerende andningtsmaske  
TR Solunum Koruyucu  
NO Filtrrende masker  
PL Maski ochronne jednorazowego uzytku

DE Siehe Benutzerinformationen  
EN See user information  
FR Consulter la notice d'information  
IT Leggi le istruzioni d'uso  
ES Véase información suministrada por el fabricante  
PT Consulte a informacao do utilizador  
NL Lees de gebruiksaanwijzing  
SV Se användare information  
TR Kullanici bilgilere bakin  
NO Se informasjon for bruker  
PL Sprawdzic w instrukcji obsługi

Warnhinweis: Falscher Einsatz oder Nichtbeachtung der beiliegenden Gebrauchsanleitung können zu dauerhaften Gesundheitsschäden führen. Das Produkt enthält keine latexhaltigen Allergie verursachenden Komponenten.



## WICHTIG:

Filtrierende Halbmasken gegen feste und flüssige Aerosole nach EN 149:2001+A1:2009. Schutzkategorie FFP2, wie auf der Maske gekennzeichnet. Die partikelfiltrierenden Halbmasken entsprechen der Verordnung der Europäischen Union 2016/425 und weisen ein entsprechendes CE-Kennzeichen auf. Sie wurden gemäß DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR getestet. CE-Zertifizierungsstelle (NB 2233): Gépteszt Kft., 1032 Budapest, Gyenes u. 12. Haltbarkeit (in Originalverpackung): Bei Lagerung im geschlossenen Beutel 4 Jahre ab Herstellungsdatum. Das vollständige technische Datenblatt, sowie die EU-Konformitätserklärung finden Sie im PDF Format im Downloadbereich der Med Supply Homepage unter [www.medsupply-germany.de](http://www.medsupply-germany.de).

## ANWENDUNGEN:

FFP2: Filtrierende Halbmaske der Kategorie FFP2 schützen gegen feste und flüssige Partikel von allen Feinstäuben bis zu einem 10-fachen des jeweils gültigen MAK- bzw. TRK-Wertes, sowie im Rahmen des Infektionsschutzes vor Viren. Filterung von mindestens 94 % der Schadstoffe/Partikel aus der Luft bis zu einer Größe von 0,6 µm.

## PRÜFUNG VOR DEM GEBRAUCH:

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die filtrierende Halbmaske einschließlich aller Bestandteile keine Löcher, Risse oder sonstige Schäden aufweist. Haben Sie einen Schaden entdeckt, NUTZEN SIE DIE MASKE AUF KEINEN FALL. Benutzen Sie eine Neue. Nationale Vorschriften sind zu beachten, z.B. DGUV-Regel 112-190 (BGR 190) „Benutzung von Atemschutzgeräten“, BGI 504-26 „Auswahlkriterien für die spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge nach dem Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz, G26 Atemschutzgeräte“.

## NR: nur für den Einmalgebrauch geeignet (maximale Tragedauer von 8 Stunden)


## WARNHINWEISE:

1. Missachtung der hier gegebenen Anweisungen oder Anwendungsbeschränkungen für dieses Produkt können die Wirksamkeit dieser Maske reduzieren und Übelkeit oder gar den Tod zur Folge haben.
2. Eine sorgfältig ausgesuchte Maske ist essenziell zum Schutz Ihrer Gesundheit. Vor der Anwendung dieser Maske konsultieren Sie eine entsprechende Sicherheitsorganisation, um festzustellen, ob diese Maske den Anforderungen des geplanten Einsatzbereiches entspricht.
3. Nur in ausreichend belüfteten Umgebungen verwenden. Nicht verwenden, wenn die Atmosphäre weniger als 19,5% Sauerstoff enthält.
4. Atemschutzmasken dürfen nicht eingesetzt werden, wenn die Konzentration der Schadstoffe eine unmittelbare Bedrohung für die Gesundheit oder das Leben darstellt, bei Asbest, Farbsprüh oder Sandstrahlarbeiten, wenn Sie Schadstoffe schmecken oder riechen, zum Schutz vor Gasen oder Dämpfen, wenn die Konzentrationen der Schadstoffe unbekannt sind oder unmittelbar lebensbedrohlich oder gesundheitsschädlich sind.
5. Nicht in explosiver Atmosphäre benutzen. 6. Arbeitsraum ist sofort zu verlassen, wenn (a) das Atmen schwierig wird, (b) Schwindel oder Erschöpfung auftritt.
7. Gesichtshaare sowie spezielle Charakteristika der Gesichtsförm können u. U. die Wirksamkeit dieser Maske reduzieren.
8. An der Maske dürfen keine Veränderungen oder Modifikationen vorgenommen werden.
9. Zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Keine Pflege notwendig. Nach Gebrauch fachgerecht entsorgen.
10. Masken in der Verpackung vor direkter Sonneneinstrahlung entfernt bis zum Gebrauch aufbewahren.



#### ANLEGEN DER MASKE:

1. Waschen und desinfizieren Sie Ihre Hände, bevor Sie die Maske anlegen und kontrollieren diese vor Gebrauch auf Verschmutzungen oder Beschädigungen. Verschmutzte oder beschädigte Masken dürfen nicht verwendet werden. 2. Maske durch Aufbiegen der Nasenklammer aufbiegen, nicht durch Ziehen an den Ohrschlaufen. 3. Maske mit beiden Händen an den Ohrschlaufen halten, am Kinn ansetzen und über Mund und Nase platzieren. Die Nasenklammer sollte hierbei genau über dem Nasenrücken sitzen. 4. Die Maske mit einer Hand vor dem Gesicht festhalten und die elastischen Ohrbänder über die Ohren ziehen, sodass die Schlaufen sicher hinter den Ohren anliegen. 5. Nasenklammer mit beiden Zeigefingern von der Mitte nach außen hin an Form der Nase andrücken, sodass die Maske gut fixiert und dicht am Gesicht anliegt. 6. Abschließend den Nasenbügel mit einer Hand festhalten und den unteren Teil der Maske unter das Kinn ziehen, damit das Vlies rundum abschließt. Die Ränder des Stoffs noch einmal abfahren und leicht an die Gesichtshaut andrücken. 7. Kontrollieren Sie den korrekten Sitz der Maske regelmäßig, damit ein beständiger und sicherer Schutz gewährleistet werden kann: Umschließen Sie dazu die Maske mit beiden Händen und atmen Sie kräftig aus. Tritt an den Seiten Luft aus, wiederholen Sie die Schritte 4 und 5. 8. Nach einmaligem Gebrauch und oder bei Durchfeuchtung fachgerecht entsorgen. Nur an den Schlaufen berühren. 9. Nach dem Abnehmen und Entsorgen der Maske die Hände gründlich waschen und desinfizieren.

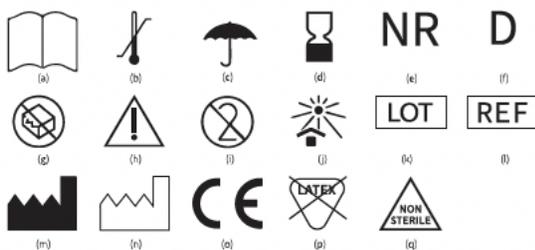

#### BEDEUTUNG DER ICONS/SYMBOLS:

(a) Siehe Benutzerinformationen. (b) Temperaturbereich bei der Lagerung. (c) Maximaler Feuchtigkeitsgrad bei der Lagerung. (d) Ende der Haltbarkeitsdauer. yyyy = Jahr; mm = Monat. (e) NR: nur für den Einmalgebrauch geeignet (maximale Tragedauer von 8 Stunden). Nicht wiederverwenden. (f) D: Erfolgreich bestandener Dolomitstaub-Einspeichertest gegen das Verstopfen ("clogging") – optionaler Teil des EN-Standards. (g) Produkt nicht verwenden, wenn die Folienverpackung beschädigt ist. (h) Warnhinweis (i) Einmalgebrauch: Kein zweites Mal verwenden. (j) vor Sonnenlicht schützen. (k) LOT: Lot-/Batchnummer. (l) Artikelnummer. (m) Hersteller. (n) Herstelldatum (o) CE-Zeichen: Dieses Produkt wurde geprüft und erfüllt alle EU-weit gültigen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz. (p) latexfrei. (q) nicht steril.

Med Supply GmbH  
Kaiserleistraße 19  
63067 Offenbach



#### QR - Code Upcoming

Scannen Sie einfach den QR-Code um mehr Informationen, sowie die EU-Konformitätserklärung auf unserer Website zu erhalten.

Simply scan the QR-code to get more information and the EU declaration of conformity on our website.